


CARGA DEL ESTERILIZADOR


Inspeccione todos los paquetes para ver si están en buen estado mientras los coloca en el esterilizador. Asegúrese de dejar suficiente espacio entre los paquetes para que circule el vapor. Coloque los objetos con la parte inferior sólida en los bordes para evitar la condensación y facilitar el secado.

INSTRUMENTOS EMBALADOS

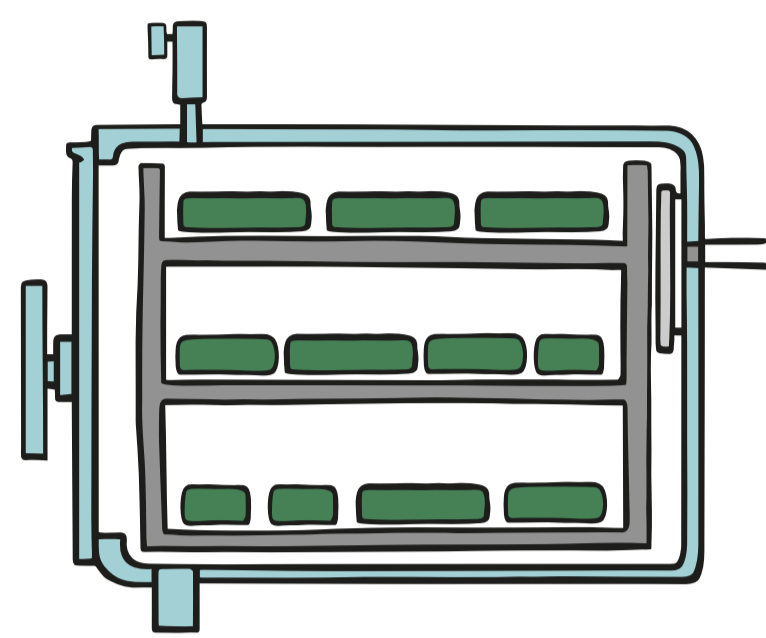


Utilice bandejas perforadas o con malla de alambre.

FUNDAS DE PAPEL-PLÁSTICO

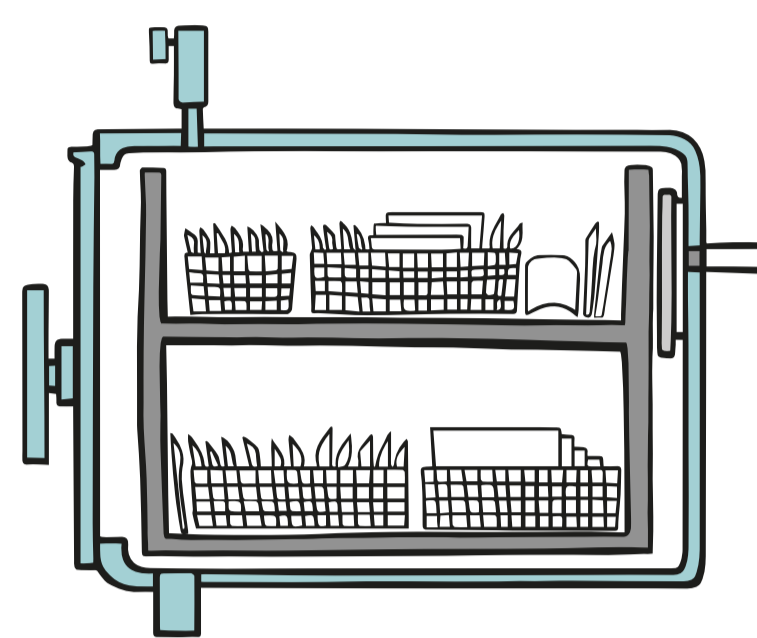


Utilice cestos con rendijas para mantener los paquetes en su lugar.

CARGA MIXTA

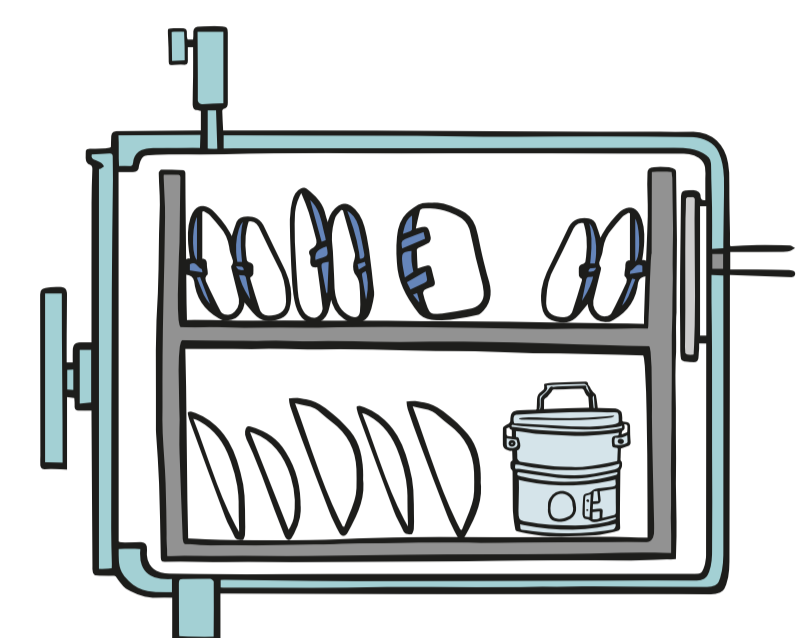


Coloque los elementos más ligeros en la parte superior y los más pesados en la inferior.

TODA LA CARGA TEXTIL

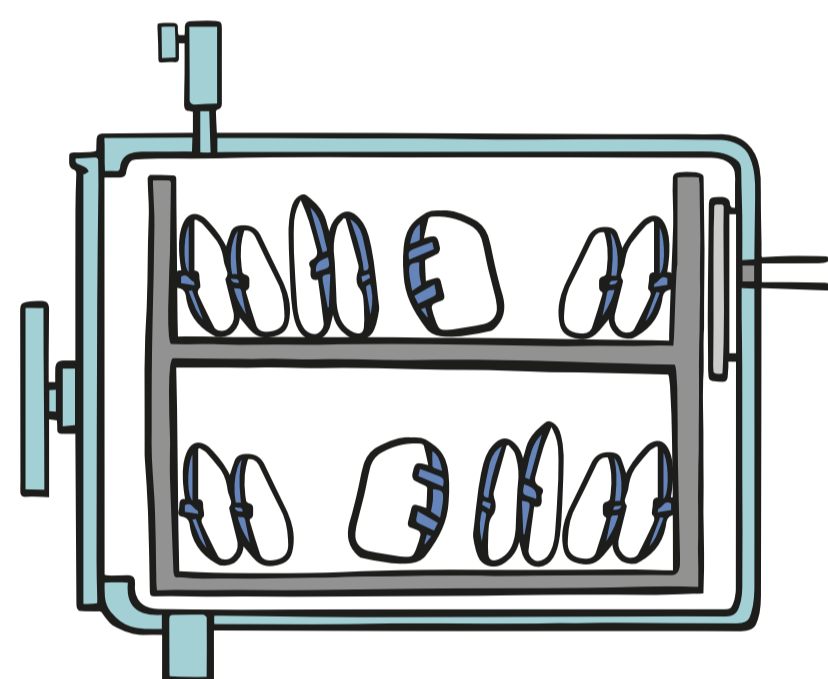


Deje espacio entre los paquetes para permitir la circulación del vapor.

SIN ESTANTES

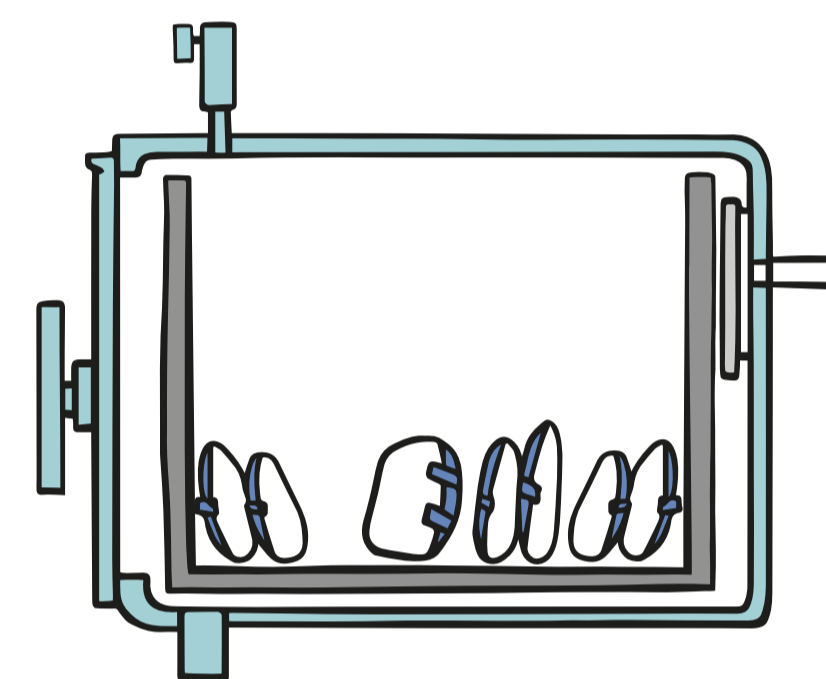


Si no hay estantes, deje espacio entre los objetos para permitir la circulación del vapor. No apile los paquetes.

INDICADOR QUÍMICO

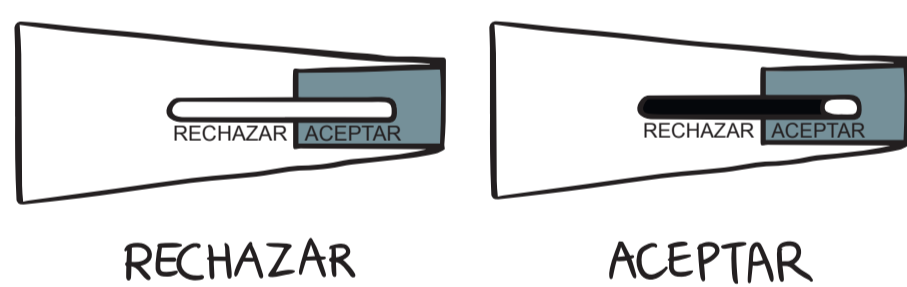


Debería colocarse un indicador interno en cada paquete para saber la temperatura o el tiempo de exposición adecuados.

FUNDAS DE PAPEL-PLÁSTICO

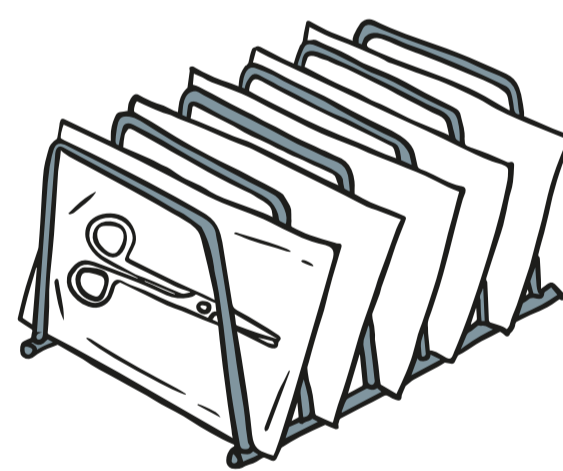

Las fundas de papel-plástico se deben colocar en los bordes, dejando el papel enfrentado al plástico.

PAQUETES EMBALADOS

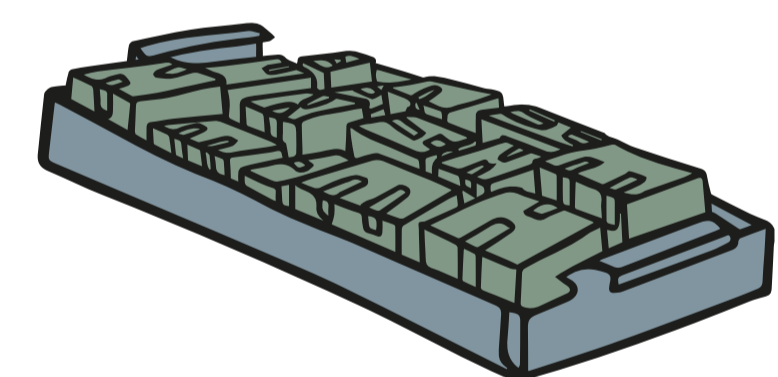

Debería haber suficiente espacio entre todos los paquetes para garantizar una circulación de vapor eficiente.

Tiempos de ciclo mínimo para ciclos de esterilización por vapor con desplazamiento por gravedad:

Elemento	Tiempo de exposición a 121°C (250°F)	Tiempo de exposición a 132°C (270°F)	Tiempo de exposición a 135°C (275°F)	Tiempos de secado
Instrumentos embalados	30 minutos	15 minutos	10 minutos	15-30 minutos
Paquetes textiles	30 minutos	25 minutos	10 minutos	15 minutos
Utensilios embalados	30 minutos	15 minutos	10 minutos	15-30 minutos
Elementos no porosos sin embalar (por ej., instrumentos)		3 minutos	3 minutos	0-1 minutos
Elementos no porosos y porosos sin embalar en carga mixta		10 minutos	10 minutos	0-1 minutos

Tiempos de ciclo mínimos para ciclos de esterilización por favor con eliminación de aire dinámica:

Elemento	Tiempo de exposición a 132°C (270°F)	Tiempo de exposición a 135°C (275°F)	Tiempos de secado
Instrumentos embalados	4 minutos	3 minutos	20-30 minutos
Paquetes textiles	4 minutos	3 minutos	16 minutos
Utensilios embalados	4 minutos	3 minutos	5-20 minutos
Elementos no porosos sin embalar (por ej., instrumentos)	4 minutos	3 minutos	3 minutos
Elementos no porosos y porosos sin embalar en carga mixta	4 minutos	3 minutos	20 minutos
			16 minutos
			No disp.
			No disp.