



# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Wollerau Pharma Rapid CAT

## VIRAL CROSS-REACTIVITY STUDY

### 1. Cross-Reactivity

Specimens were tested three times each using devices from three batches. Visual interpretations were made after 15 minutes. Results are presented in Table 1 below.

Virus	Batch 30C002012		Batch 30C002013		Batch 30C002014	
	Neg.	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.	Pos.
MERS	Y		Y		Y	
NL63	Y		Y		Y	
229E	Y		Y		Y	
OC43	Y		Y		Y	
HAdV-1	Y		Y		Y	
HAdV-3	Y		Y		Y	
HAdV-8	Y		Y		Y	
HAdV-18	Y		Y		Y	
HAdV-23	Y		Y		Y	
HAdV-7	Y		Y		Y	
HAdV-5	Y		Y		Y	
HAdV-11	Y		Y		Y	
HPIV-1	Y		Y		Y	
HPIV-2	Y		Y		Y	
HPIV-3	Y		Y		Y	
HPIV-4	Y		Y		Y	
HRV-1	Y		Y		Y	
HRV-14	Y		Y		Y	
HRV-42	Y		Y		Y	
HMPV	Y		Y		Y	
RSV-A	Y		Y		Y	
RSV-B	Y		Y		Y	

**Conclusion:** There was no cross-reaction with above viruses.