

# MASCHERINA

## Chirurgica Monouso



### Tipo IIR


Capacità filtrante  $\geq 98\%$  DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

**IT:** Mascherina Chirurgica in TNT 3 strati, Tipo IIR (ISO14683:2019) - Dispositivo Medico di Classe I - NON STERILE per uso medico chirurgico professionale. MONOUSO (il dispositivo è monouso in quanto il suo riutilizzo non garantisce il mantenimento delle caratteristiche tecniche e di sicurezza del prodotto) - La mascherina chirurgica protegge l'ambiente sanitario dalla trasmissione di agenti infettanti provenienti dall'utilizzatore - Non sono segnalate interferenze o rischi per uso congiunto con altri dispositivi. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata o evidenti difetti, quali TNT danneggiato, bucato, scucito. Non reintrodurre nella confezione dopo il prelievo. Sostituire la mascherina in caso di situazioni anomale e se necessario istituire controlli sanitari appropriati sull'utilizzatore - La mascherina non è un DPI ai sensi del D.Lgs. 17/2019 - Conservare in ambiente asciutto e pulito al riparo da fonti di calore o umidità eccessiva - Dopo l'uso smaltire come rifiuto ospedaliero.

Mascherina Chirurgica Tipo IIR (UNI EN ISO 14683:2009 e UNI EN ISO 10993-5:2009).

### Istruzioni di utilizzo:

1. Indossare la mascherina afferrandola dai lacci. 2. Fissarla sistemando i lacci dietro le orecchie. 3. Sistemarla al viso per coprire bene la zona interessata. 4. Adattare la barretta rigida al naso per garantire una migliore protezione. 5. Non toccare il corpo della mascherina con le dita o le mani.

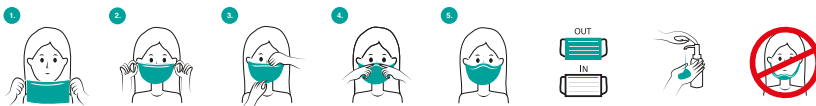

Tenere la mascherina con lo strato colorato esterno e il nasello in alto. Prima di indossarla e dopo la rimozione lavarsi le mani e disinfettarle. Non lasciare mai la mascherina appesa intorno al collo. Sostituire la mascherina al termine dell'attività.

**MADE IN ITALY**



MAS 003 8 015937 120037