



Gebrauchsanweisung

Coronavirus Abstrich-Kit mit Laborauswertung



Probenentnahme- und Einsendekit zur Durchführung eines Rachenabstrichs als Probe zum Erregernachweis auf SARS-CoV-2 in einem Labor. Gebrauchsanweisung vor Durchführung vollständig und sorgfältig lesen.

Inhalt des Abstrich-Kits


Anleitung mit Barcodeetikett
Analysekarte
Laboreinsendeschein
Probenröhrchen mit Abstrichtupfer
Holzspatel
Laborbeutel (transparent) mit Saugmaterial
Versandbeutel (weiß) mit Gefahrgutaufkleber

Barcode und Analysennummer

Kleben Sie den Barcode auf das Probenröhrchen. Behalten Sie die Analysennummer für sich selbst zu Hause. Das Ergebnis Ihrer Analyse können Sie einsehen unter: www.coronaone.org/analyse

Barcode für Probenröhrchen

Analysennummer für Sie

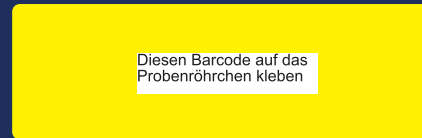

Schritt 1: Vorbereitung



1. Eine Stunden vorher nicht mehr essen, trinken, rauchen oder Mund ausspülen
2. Hände mind. 30 Sekunden mit Seife waschen
3. Anleitung mit Klebeband neben Spiegel kleben
4. Holzspatel entpacken und in Becher stellen
5. Probenröhrchen aufgedreht in Becher stellen
6. Abstrichtupfer in Verpackung lassen


Schritt 2: Abstrich durchführen



Abstrichtupfer stets nur am Ende des Schafts berühren und nie offen auf Oberflächen ablegen! Kontaminationsgefahr!

Video für die Abstrichentnahme: www.coronaone.org/video

1. Mit dem Holzspatel die Zunge flach herunter drücken
2. Tief Luft holen und während dem nächstem Schritt langsam ausatmen
3. **Abstrichtupfer tief in den Rachen, bis hinter das Zäpfchen**, einführen. Mit leichtem Druck mehrmals über die Rachenwand streichen
4. **Check** (rote Box) durchführen und wenn nötig Abstrich wiederholen

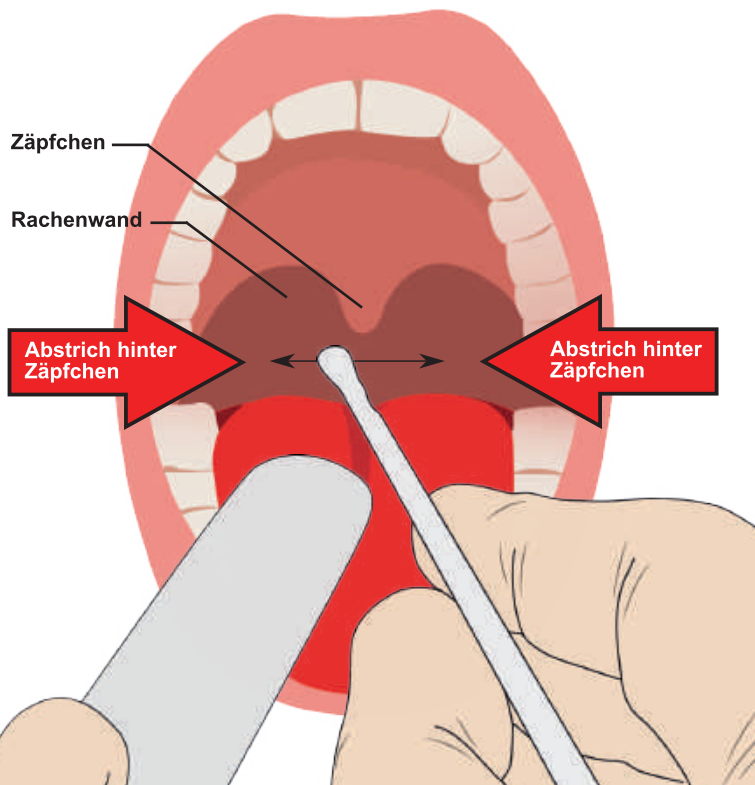

Check: Abstrich richtig gemacht?

Die folgenden Fragen müssen Sie eindeutig mit "JA" beantworten können:

- Wurde der Abstrich hinter dem Zäpfchen gemacht (nicht davor)?
- Haben Sie starken Würgereiz, Husten oder feuchte Augen bekommen?
- Hat der Abstrichtupfer sichtlich Rachenschleim aufgenommen?

Falls Sie eine der Fragen mit "NEIN" beantwortet haben, wiederholen Sie den Abstrich, oder bitten Sie eine andere Person um Hilfe.

BEI UNSICHERHEIT ABSTRICH VON ARZT NEHMEN LASSEN!

Schritt 3: Probe beschriften und verpacken



1. Abstrichtupfer in **Probenröhrchen** stecken, abknicken und zudrehen
2. Name und Geburtstag auf Probenröhrchen schreiben
3. Barcode von der Anleitung auf Probenröhrchen kleben
4. Probenröhrchen **im durchsichtigen Laborbeutel verpacken** und verschließen

Schritt 4: Laborschein ausfüllen



1. Laborschein vollständig ausfüllen
2. Bedingungen und Einwilligung unterzeichnen

Schritt 5: Versandfertig verpacken



Analysekarte & Anleitung nicht einsenden

1. Laborbeutel mit Probe in Karton legen
2. Laborschein mit in Karton legen
3. Karton verschließen
4. Karton in den Versandbeutel legen und zukleben
5. Karton **im Kühlschrank (5-8 °C)** lagern

Schritt 6: Abholung und Analyseergebnis



1. Abholung der Probe per Kurier **sofort buchen**: www.coronaone.org/abholung
2. Ergebnis **mit Analysekarte** online einsehen unter: www.coronaone.org/analyse

Gebrauchsanweisung zum Coronavirus Abstrich-Kit mit Laborauswertung (SARS-CoV-2)

Wichtig:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Durchführung beginnen. Prüfen Sie außerdem den Inhalt des Abstrich-Kits vor Durchführung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Halten Sie sich vor, während und nach der Durchführung strikt an die Anleitung und führen Sie die Anweisungen entsprechend durch. Hersteller und Inverkehrbringer haften nicht für unangemessenen oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Bei Unsicherheit oder Schwierigkeiten fragen Sie bitte Ihre hausärztliche Praxis oder unseren Kundensupport, bevor Sie fortfahren.

Video:

Ein Video zur Durchführung des Rachenabstrichs haben wir online bereitgestellt. Bitte schauen Sie das Video zusätzlich zur Gebrauchsanweisung vor der Durchführung.

Zweckbestimmung:

Das Coronavirus Abstrich-Kit ist ein für Laien vorgesehenes Probenentnahme- und Einsendekit zum einmaligen Gebrauch für die Durchführung eines Rachenabstrichs am Oropharynx. Der entnommene Rachenabstrich kann anschließend als Probenmaterial für einen Test (Erregernachweis) auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) in einem geeigneten medizinischen Labor verwendet werden. Das Abstrich-Kit kann nur zur Entnahme und Einsendung des Abstrichs genutzt werden; ein Nachweis des Erregers ist mit dem Abstrich-Kit nicht möglich. Das Abstrich-Kit ist kein Selbsttest und kein In-vitro Diagnostikum zur Eigenanwendung. Das Abstrich-Kit dient zur In-vitro Anwendung.

Keine medizinische Diagnose oder Beratung:

Das Abstrich-Kit, die Auswertung und sämtliche vom Hersteller bereitgestellten Informationen dienen nicht als medizinische Beratung und stellen keine Diagnose, Befundung oder Behandlung dar. Sie dürfen nicht verwendet werden, um medizinische Entscheidungen zu treffen. Sämtliche medizinische Entscheidungen und Leistungen können und dürfen nur von einem Arzt durchgeführt werden. Konsultieren Sie hierzu bitte Ihre hausärztliche Praxis, die ärztliche Bereitschaft oder Ihre zuständige Gesundheitsbehörde. Im Fall eines Notfalls rufen Sie bitte sofort die 112 (Notruf).

Meldepflicht:

Der Verdacht einer Erkrankung mit SARS-CoV-2 / COVID-19 ist meldepflichtig gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5a IfSG (Auftreten einer bedrohlichen Krankheit). Bei Verdacht wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Gesundheitsbehörde.

Hintergrundinformationen:

Das „neuartige“ Coronavirus trägt im Fachbereich die Bezeichnung SARS-CoV-2 (anfangs 2019-nCoV, engl. für severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, deutsch schweres akutes respiratorisches Syndrom-Coronavirus-2). Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um ein Virus, das bei Patienten die Atemwegserkrankung COVID-19 (engl. für coronavirus disease 2019, deutsch Coronavirus-Krankheit-2019) hervorruft kann. Eine Ansteckung erfolgt häufig durch Tröpfchenübertragung und Aerosole. Die Krankheitsverläufe sind häufig unspezifisch, vielfältig bis hin zu asymptomatisch. Auch symptomlose Patienten können infiziert sein und das Virus potenziell übertragen. Diese Informationen sind nicht abschließend, da das Virus und die Erkrankung derzeit intensiv erforscht werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Gesundheitsbehörde.

Inhaltsbeschreibung:

Das Abstrich-Kit besteht aus folgenden Komponenten und darf ausschließlich zusammen mit diesen verwendet werden:

- 1 Gebrauchsanweisung, mit Barcode
- 1 Analysekarte, mit Barcode
- 1 Laborschein, mit Barcode
- 1 Abstrichtupfer mit Probenröhrchen
- 1 Zungenspatel
- 1 Laborprobenbeutel, transparent, ausgelegt mit absorbierendem Material (nach UN3373)
- 1 Versandbeutel, weiß, etikettiert mit Gefahrgutetikett (nach UN3373)
- 1 Karton, braun/weiß, etikettiert mit Herstellerangaben

Kontrollieren Sie vor Benutzung des Produkts das Abstrich-Kit und alle Komponenten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Der Karton darf nicht beschädigt sein und darf zuvor nicht geöffnet worden sein.

Falls das Abstrich-Kit oder einzelne der enthaltenen Komponenten fehlen sollten, beschädigt sein sollten oder abgelaufen sein sollten, so dürfen Sie das Abstrich-Kit nicht benutzen. Tauschen Sie keine der Komponenten selbst aus und unternehmen Sie keine Versuche, den Fehler selbst zu beheben. Kontaktieren Sie innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt des Produkts unseren Kundensupport per Email unter mail@coronaone.org. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen schnellstmöglich ein Ersatzprodukt zukommen lassen.

Vor der Durchführung:

Lesen Sie die Anweisungen vollständig und sorgfältig durch und schauen Sie das Video.
Kontrollieren Sie den Inhalt des Abstrich-Kits auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
Bereiten Sie sich 60 Minuten vor Durchführung des Abstrichs folgendermaßen vor:

- Essen, trinken oder rauchen Sie nichts mehr
- Benutzen Sie kein(e) Mundspülung, Mundwasser, Kaugummi, oder andere atemerfrische Substanzen mehr
- Spülen Sie Ihren Mund nicht mehr aus und putzen Sie nicht die Zähne
- Benutzen Sie das Produkt nur an einem aufgeräumten, hygienischen und hellen Ort:
- Führen Sie den Abstrich vor einem Spiegel durch, in dem Sie Ihren Rachenraum bei geöffnetem Mund gut sehen können
- Kleben Sie die Anleitung gut sichtbar neben den Spiegel, sodass Sie diese gut sehen können
- Stellen Sie einen sauberen Becher neben dem Spiegel bereit
- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Dauer der Durchführung nicht gestört werden.

Waschen Sie sich unmittelbar vor Durchführung gründlich, mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit Seife.

Während der Durchführung:

Führen Sie alle Schritte vollständig und in der angegebenen Reihenfolge ohne Unterbrechung durch, wie in den Anweisungen und den zugehörigen Bildern beschrieben. Nutzen Sie zusätzlich das Video.

Schauen Sie sich insbesondere das anatomische Bild des Mundraums genau an. Der Abstrich darf ausschließlich von der Rachenwand (Oropharynx) mit der Spitze des Abstrichtupfers entnommen werden. Die Rachenwand befindet sich am hinteren Ende des Mundraums, hinter dem Zäpfchen. Der Abstrich darf nicht an Gaumen, Zäpfchen, Zunge, Zähnen, Lippen oder anderen Regionen im Mundraum erfolgen.

Falls Sie starken Würgereiz haben und/oder sich die Durchführung nicht selbst zutrauen, bitten Sie eine andere Person in Ihrem Haushalt, den Abstrich bei Ihnen durchzuführen.

- Die Person muss vor der Durchführung die Anweisungen vollständig und sorgfältig durchgelesen haben und das Video geschaut haben
- Die Person muss vor der Durchführung Handschuhe, eine Maske und ggf. weitere Schutzkleidung anziehen und diese bis nach der Durchführung angezogen lassen

Nach der Durchführung:

Waschen Sie sich erneut gründlich die Hände mit Seife.
Beachten Sie alle Lager- und Transportbedingungen für das Abstrich-Kit.

Einschränkungen der Verwendung:

- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Kindern geeignet. Es besteht ein hohes Verschluckungs- und Verletzungsrisiko. Ein Abstrich darf bei Kindern nur durch einen Arzt erfolgen
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch Personen unter 18 Jahren geeignet
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die unter starkem Würgereiz leiden. Es besteht ein hohes Verschluckungsrisiko. Ein Arzt kann in diesem Fall einen Abstrich an einer anderen Stelle durchführen
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die kürzlich eine schwere Erkrankung (z. B. Mandelentzündung), eine Operation (z. B. Mandelentfernung) und/oder sonstige anatomische Einschränkungen im Mundrachen hatten oder haben. Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko. Ein Arzt kann in diesem Fall einen Abstrich an einer anderen Stelle durchführen
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch Personen mit visuellen, kognitiven und/oder motorischen Einschränkungen geeignet. Es ist ebenfalls nicht für Personen geeignet, die unter Krankheiten leiden, die potenziell zu unkontrollierten Bewegungen führen können (z. B. Epilepsie)
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch Personen geeignet, die zum Lesen der Gebrauchsanweisung auf eine externe Lesehilfe (z. B. Monokel) angewiesen sind
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die sich vor weniger als fünf Tagen oder vor mehr als vierzehn Tagen mit SARS-CoV-2 infiziert haben
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die in der Vergangenheit bereits positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die an einer Studie zu Impfstoffen an SARS-CoV-2 teilgenommen haben

Vorsichtsmaßnahmen:

Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig vor, während und nach der Durchführung und halten Sie sich stets an die Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann es zu Risiken, Verletzungen oder zum Austreten potenziell infektiösen Materials kommen, was eine Infektionsquelle für andere Menschen darstellt.

Im Bezug auf das Abstrich-Kit:

- Das Abstrich-Kit muss unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.
- Das Abstrich-Kit enthält Kleinteile und Plastik, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr
- Das Abstrich-Kit darf ausschließlich für Probenentnahme und -einsendung eines Abstrichs aus dem Rachen (Oropharynx) entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Der Abstrich darf ausschließlich in einem geeigneten Labor als Probenmaterial zum Erregernachweis auf SARS-CoV-2 genutzt werden. Das Kit ist nicht für andere Zwecke geeignet
- Das Abstrich-Kit und sämtliche Komponenten dürfen nur einmalig und von ein und derselben Person verwendet werden. Nach Benutzung sind das Abstrich-Kit und sämtliche Komponenten wie potenziell infektiöses Material zu handhaben. Sie dürfen weder wiederverwendet noch wiedersterilisiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung
- Das Abstrich-Kit muss nach erstmaligem Öffnen unverzüglich verwendet werden und darf nicht für eine spätere Nutzung wieder verschlossen werden
- Das Abstrich-Kit darf nur bis zum Ablaufdatum verwendet werden, sofern die ebenfalls auf dem Etikett angegebenen Lager- und Transportbedingungen eingehalten werden
- Das Abstrich-Kit besitzt keinen Kontrollmechanismus, der eine korrekte Benutzung bestätigt oder garantiert

Im Bezug auf den Abstrichtupfer und den Zungenspatel:

- Der Abstrichtupfer und Zungenspatel sind eigenständige medizinische Produkte. Lesen Sie für mehr Informationen die Gebrauchsanweisung beider Komponenten direkt auf der Seite der Hersteller
- Der Abstrichtupfer und der Zungenspatel sind vom Hersteller in einer Schutzverpackung individuell verschweißt. Die Schutzverpackung des Abstrichtupfers und des Zungenspatels muss unbeschädigt und ungeöffnet sein. Das Abstrich-Kit darf dürfen nicht verwendet werden, wenn eine der Komponenten beschädigt oder geöffnet ist
- Achten Sie auf die korrekte Handhabung, Lagerung und Transport des Abstrichtupfers und des Zungenspatels entsprechend der Anweisungen auf der Schutzverpackung
- Berühren Sie den Abstrichtupfer nach Entpacken nur an der Kappe oder am Ende des Schafts, niemals an der Spitze des Tupfers, die in den Mundrachen eingeführt wird, um Kontamination zu vermeiden
- Berühren Sie den Zungenspatel nach Entpacken nur an einem Ende und nie an einer Stelle, die Ihre Zunge oder Ihren Mundraum berührt, um Kontamination zu vermeiden
- Benutzen Sie beide Komponenten direkt und ohne Unterbrechung nach dem Entpacken. Achten Sie darauf, beide Komponenten nicht auf Oberflächen abzuliegen, um Kontamination und/oder Infektionen zu vermeiden
- Bei der Entnahme des Abstrichs nur wenig Druck anwenden, da sonst das Material des Abstrichtupfers brechen könnte
- Beim Herunterdrücken der Zunge nur wenig Druck anwenden, da sonst das Material des Zungenspatels brechen könnte
- Ein leichtes Vergilben der Spitze des Abstrichtupfers ist ein allseits bekanntes Phänomen. Dies kann auf viele Faktoren zurückführbar sein: die Art des Rohstoffs, die Sterilisationsbehandlung des Produkts, die natürliche Alterung des Produkts. Das Vergilben des Produkts ist nicht unbedingt ein Hinweis für den Verfall desselben. Achten Sie auf das Ablaufdatum
- Die Haftung der Faser an der Spitze des Abstrichtupfer wurde für eine augenblickliche Entnahme der Probe getestet. Ein längerer Kontakt zwischen der Spitze und dem Rachenraum kann zur Abtrennung der Faser führen
- Falls der Abstrich von einer anderen Person durchgeführt wird, muss diese geeignete Schutzrüstung zur Entnahme eines Rachenabstrichs anlegen, insbesondere eine Maske und Schutzhandschuhe
- Das Abstrich-Kit, der Abstrichtupfer und der Zungenspatel sind nach Durchführung des Rachenabstrichs mit potenziell infektiösem Material kontaminiert. Sie stellen ein Infektionsrisiko für andere Menschen dar. Lagern und transportieren Sie das Abstrich-Kit und entsorgen Sie die restlichen Komponenten nur entsprechend der Anweisungen
- Der Abstrichtupfer und der Zungenspatel dürfen nur bis zum Ablaufdatum verwendet werden, sofern die ebenfalls auf dem Etikett angegebenen Lager- und Transportbedingungen eingehalten werden. Beachten Sie das individuelle Ablaufdatum und die individuellen Lager- und Transportbedingungen auf der Schutzverpackung des Abstrichtupfers und des Zungenspatels

Im Bezug auf den Rückversand:

- Der Laborprobenbeutel und der Versandbeutel müssen unbeschädigt und luftdicht sein. Das Abstrich-Kit darf nicht verwendet werden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist
- Der Laborprobenbeutel muss allen Bestimmungen nach UN3373 / P650 entsprechen. Er muss mit ausreichend saugfähigem Material ausgelegt werden und luftdicht verschlossen werden, sodass keine Flüssigkeit auslaufen oder entweichen kann

- Der Versandbeutel muss allen Bestimmungen nach UN3373 / P650 entsprechen. Er muss die korrekte Gefahrgutkennzeichnung „UN3373“ aufweisen und den Karton vollständig und luftdicht verschließen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten mit Chlorbleiche oder Desinfektionsmittel aufgewischt werden
- Der Rückversand darf nur über einen geeigneten Versanddienstleister des Herstellers erfolgen

Im Bezug auf die Auswertung im Labor:

- Das Abstrich-Kit kann nur zur Probenentnahme- und Einsendung verwendet werden. Es kann selbst nicht zum Nachweis auf SARS-CoV-2 verwendet werden
- Die Auswertung darf ausschließlich in einem geeigneten Labor des Herstellers stattfinden
- Die Auswertung des Abstrich-Kits stellt keine ärztliche Beratung, Diagnose, Befundung oder Behandlung dar und ersetzt diese nicht. Die Auswertung darf nicht verwendet werden, um medizinische Entscheidungen zu treffen. Sämtliche medizinische Entscheidungen und Leistungen können und dürfen nur von einem Arzt durchgeführt werden
- Eine negative Auswertung schließt einen Kontakt oder eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus*
- Eine positive Auswertung legt den Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 nahe. Begeben Sie sich unverzüglich in häusliche Quarantäne und informieren Sie Ihre zuständige Gesundheitsbehörde*
- Das Ergebnis der Auswertung kann falsch-negativ oder falsch-positiv sein. Es dürfen keine medizinischen Entscheidungen aufgrund des Ergebnisses getroffen werden*
- Halten Sie sich unabhängig vom Ergebnis der Auswertung an sämtliche Vorschriften zum Infektionsschutz. Die jeweils aktuellen Vorschriften erforschen Sie von Ihrer zuständigen Gesundheitsbehörde

*Hinweise des Herstellers zur Laborauswertung dienen lediglich der allgemeinen Aufklärung und stellen keine medizinischen Informationen dar. Der Hersteller erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Hinweise. Bitte informieren Sie sich zur Auswertung, zur Interpretation und zu den zu treffenden Maßnahmen bei Ihrer hausärztlichen Praxis oder Ihrer zuständigen Gesundheitsbehörde.

Es werden keine Angaben zu den Leistungsmerkmalen der Auswertung gemacht.

Lager- und Transportbedingungen:

- Das Abstrich-Kit muss kühl, trocken, staubarm und geschützt vor Sonneneinstrahlung zwischen 2 °C und 30 °C gelagert werden
- Das Abstrich-Kit darf nicht eingefroren werden
- Das Abstrich-Kit sollte bei Raumtemperatur zwischen 15 °C und 30 °C benutzt werden
- Die sterile Schutzverpackung des Abstrichtupfers und des Zungenspatels dürfen erst unmittelbar vor Durchführung des Abstrichs und geöffnet werden. Die Sterilität ist nur erhalten, solange die Schutzverpackung noch nicht geöffnet wurde und unbeschädigt ist
- Behandeln Sie den benutzen Abstrichtupfer und den Zungenspatel wie potenziell infektiöses Material. Verpacken Sie den Abstrichtupfer sorgfältig entsprechend der Anweisungen für den Rücktransport
- Das benutzte Abstrich-Kit kann gekühlt werden, sofern es für den Rücktransport vollständig verpackt wurde. Die Kühlltemperatur muss zwischen 2 °C und 8 °C liegen
- Wenn Sie das Abstrich-Kit in einem Kühlschrank lagern, achten Sie darauf, dass der Gefahrgutauflkleber „UN3373“ gut sichtbar angebracht ist und unterrichten Sie jeden, der den Kühlschrank nutzen könnte, über den Inhalt
- Der Rücktransport des benutzten Abstrich-Kits darf ausschließlich als Gefahrgut mit der Kennzeichnung „UN3373 – Biologischer Stoff Kategorie B“ erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Gefahrgutauflkleber „UN3373“ gut sichtbar angebracht ist
- Der Rücktransport des benutzten Abstrich-Kits darf ausschließlich per Express erfolgen und wird vom Hersteller beauftragt

Entsorgung:

Die benutzten Komponenten können Sie, sofern keine anderen Vorschriften gelten, im Hausmüll entsorgen. Achten Sie bei der Entsorgung auf die geltenden Vorschriften.


Fragen:

Bei Fragen zum Abstrich-Kit wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport per E-Mail an mail@coronaone.org. oder per Telefon an +49 176 96400505. Unser Kundensupport ist wochentags von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar.


Letzte Überarbeitung:


23. August 2020, Berlin, überarbeitet von CS


Prüfen Sie, ob dies die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung ist. Die aktuellste Gebrauchsanweisung finden Sie stets online unter: www.coronaone.org/coronavirus-test.


 **98/97/EG, Anhang III, IVD Sonstige**
Nur zur In-vitro Anwendung


 **Gebrauchsanweisung beachten**


 **Nur zur einmaligen Anwendung**


 **Lagern zwischen 5-25°C**




 **Nicht benutzen, falls Verpackung beschädigt**


 **Vorsicht bei der Benutzung**

 **Ref: Siehe Außenverpackung**

 **Lot: Siehe Außenverpackung**

 **Ablaufdatum: Siehe Außenverpackung**

 **TEERX Lifescience UG**
(haftungsbeschränkt)
Rheinsberger Str. 76
10115 Berlin
Deutschland

mail@coronaone.org
+49 176 96400505
www.coronaone.org