

Bleiben Sie
sicher mobil,
trotz
Fußverletzung



SICHERN SIE IHR OPERATIONSERGEBNIS


Sie haben sich den Fuß oder das Sprunggelenk verletzt oder sind gerade frisch operiert?

Es ist nicht einfach, einen verletzten Fuß wirklich „stillzulegen“ und gleichzeitig mobil zu bleiben. Alltägliche Dinge werden zur Herausforderung. Das ständige Laufen mit Gehstützen erfordert Kraft und Geschick. Falsche Lagerung oder Fehlbelastung können zu weiteren Arztbesuchen und oder einer längeren Arbeitsunfähigkeit führen.

Das Medizinprodukt ORTHOSCOOT® hilft Patienten, die nach einer Verletzung an Fuß und Sprunggelenk nicht belasten dürfen. Der Patient kniet mit dem verletzten Bein auf dem Hilfsmittel und stößt sich mit dem gesunden Bein ab. Das verletzte Bein wird durch die sicher geführte Entlastung und ideale Lagerung in der ergonomischen Knieauflage geschützt, während die Wegefähigkeit des Patienten wiederhergestellt wird.



DIE VORTEILE FÜR PATIENTEN

- **Sichere Fortbewegung** ohne die Hilfe Dritter
- **Sicherung des Operationsergebnisses** durch **geführte Entlastung** und ideale Lagerung des Fußes
- Aktive Verwendung wirkt dem **Muskelabbau entgegen**
- Entlastung von **Rückenmuskulatur, Schultern und Handgelenken**
- **Bewegungsfreiheit der Hände**
- Die speziell entwickelte **Halterung für Gehstützen** ermöglicht deren Transport und den schnellen Zugriff
- **Klappbar und werkzeuglos auf- und abbaubar** für leichten Transport z.B. im Kofferraum oder Bahn
- **TÜV-geprüft** nach DIN ISO 11199-2 und EN-12182 
- **Nachhaltig im Sanitätsfachhandel mieten statt kaufen.**

DER ORTHOSCOOT® IM DETAIL



Lenkeinheit als Tragegriff für leichten transport



Transportfach



Ergonomisches Kniepolster mit Winkeleinstellung



Werkzeugloser Auf- und Abbau



Integrierter Gehstützenhalter



Stoß- und schockabsorbierende Spezialreifen



Hand- und Feststellbremse bis 150 kg

ERFAHRUNGEN



„Aus physiotherapeutischer Sicht bin ich absolut begeistert vom ORTHOSCOOT®. Während der Ruhigstellungsphase des Fußes bleibt man sicher und selbstständig mobil, belastet nicht unnötig den Schultergürtel durch Gehstützen und bleibt mental positiv, da man seinen Alltag meistern kann. Der ORTHOSCOOT® reduziert das Sturzpotenzial enorm“

STEFANIE L., PHYSIOTHERAPEUTIN

„Nach meiner OP am Fuß war ich im Haus ganz schnell wieder mobil. Dank des Transportfachs konnte ich auch Kleinigkeiten damit transportieren, um mich selbst versorgen zu können, was mit Krücken kaum möglich wäre, da man nichts tragen kann. Der ORTHOSCOOT® ist die Rettung für meinen Alltag!“

MARCO H., PATIENT



„Der ORTHOSCOOT® entlastet den betroffenen Fuß, fördert die baldige Selbstständigkeit nach Operationen und trägt dadurch erheblich zur Steigerung der Lebensqualität in diesem ohnehin belastenden Lebensabschnitt bei.“

PD DR. MED. JÜRGEN GÖTZ, MHBA

Europäisch zertifizierter Fuß- und Sprunggelenkchirurg

SO FUNKTIONIERT'S

Arzt aufsuchen

Sie erhalten eine
Verordnung / Rezept



1

Bestellung

Gehen Sie mit Ihrer
Verordnung / Rezept zu Ihrem
Sanitätshaus vor Ort



2

Auslieferung

Die Auslieferung und Einweisung
erfolgt durch Ihr Sanitätshaus



3

Retoure

Geben Sie den ORTHOSCOOT®
im Sanitätshaus wieder zurück



4

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

Sollte Ihr lokales Sanitätshaus noch kein ORTHOSCOOT®-Partner sein, so melden Sie sich unter der kostenfreien Hotline. Wir kümmern uns um Ihre Versorgung!



Kostenlose Hotline

0800 725 82 84

SANITÄTSFACHHANDEL

Indikation - Wann eignet sich der ORTHOSCOOT®?

Bei erforderlicher Ruhigstellung und Entlastung

- Frakturen von Sprunggelenk, Fußwurzel oder Mittelfuß
- Verletzungen von sprunggelenksumgreifenden Sehnen
- Schwere Weichteilverletzungen an Fuß- und Sprunggelenk
- Komplexe Bandverletzungen von Fuß- und Sprunggelenk
- Amputationen auf Höhe distaler Unterschenkel, Sprunggelenk, Mittelfuß oder Zehen
- Revisionseingriffe der unteren Extremität
- Verletzung der unteren Extremität bei zugleich vorgeschädigter oberen Extremität
- Osteochondrale Verletzungen an Sprunggelenk oder Fußwurzel
- Nach Operationen am Fersenbein oder anderen Fußwurzelknochen
- Nach schwerwiegenden operativen Eingriffen am Vorfuß

Nach Korrektur von schweren Fußdeformitäten

- Klumpfuß, Plattfuß, Cavovarus Fuß

Kontraindikation - wann darf der ORTHOSCOOT® NH1 nicht verwendet werden?

Unter gewissen Umständen, ist die Verwendung eines orthopädischen Rollers nicht geeignet. Fragen Sie hierzu bitte Ihren behandelnden Arzt.

Technische Daten

Gewicht	14,1 kg
Länge / Breite / Höhe	920 mm / 580 mm / min. 870 mm - max. 960 mm
Einsatzbereich	Körpergröße 140-200 cm, Gewicht bis 150 kg
Geräusentwicklung	20-30 Dezibel auf glattem Untergrund
Packmaße	L 840 mm / B 480 mm / H 530 mm
Gurtmaß	2860 mm

Optionales Zubehör

ORTHOSCOOT® Bügelschloss (Art.-Nr. NH1 ZB-0001), ORTHOSCOOT 4tes Rad (Art.-Nr. NH1ER/1018)

Transport und Versand

Der ORTHOSCOOT® kann für den Transport in PKW, Flugzeug und Bahn geklappt werden. Für den Versand verweisen wir ausschließlich auf die ORTHOSCOOT® Versandkartonage.

Wartung und Reinigung

Der ORTHOSCOOT® ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu warten. Grundreinigung und Desinfektion sind vor jedem Nutzerwechsel durchzuführen. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich vom Hersteller selbst durchgeführt werden. Der ORTHOSCOOT® darf nicht mit aggressiven, ätzenden oder scheuernden Substanzen gereinigt werden. Zur Desinfektion verweisen wir auf zugelassene, handelsübliche Produkte, ausschließlich ohne Chloridzusätze.



MDR (EU) 2017/745
DIN EN ISO 13485
ISO 9001
Hilfsmittelnummer beantragt



**Klimaneutrales
Unternehmen**
mit First Climate



ORTHOSCOOT GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß

T +49 (0) 821 71 01 99-20
F +49 (0) 821 71 01 99-40
M info@orthoscoot.com

orthoscoot.com



MIT **SICHERHEIT**
MEHR **MOBILITÄT**