


Návod k použití

deconex® PROZYME ACTIVE

Vysoce účinný neutrální koncentrovaný čisticí prostředek (detergent) s větším počtem enzymů

Je vhodný pro vysoce náročné ruční čištění chirurgických nástrojů, minimálně invazivních nástrojů, dentálních nástrojů, anestetických prostředků a prostředků pro nemocniční oddělení, a zejména pro pevné a pružné endoskopy.

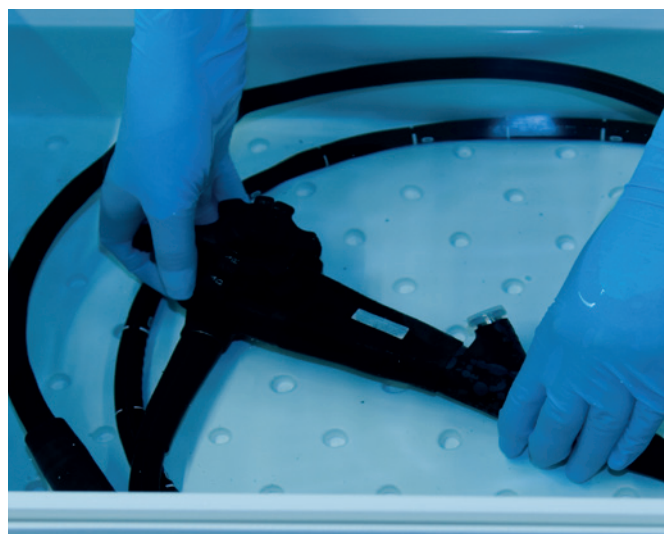

Oblast použití

deconex® PROZYME ACTIVE je vysoce účinný neutrální čisticí prostředek s větším počtem enzymů, který lze použít k ručnímu čištění před automatizovanou regenerací v namáčecí lázni a ultrazvukové lázni s nebo bez oplachu. Zejména je vhodný k ručnímu čištění pružných nebo pevných endoskopů, protože je konkrétně určen k odstraňování biofilmu.

Vlastnosti

deconex® PROZYME ACTIVE má inovativní složení, ve které se spojují čtyři vysoce kvalitní enzymy (proteáza, lipáza, amyláza a celulóza) a povrchově aktivní látky pro velmi účinné čištění a snášenlivost s materiály, hloubkové odstraňování biofilmu, použití v nízkých koncentracích a pro široké spektrum účelů. Díky svému složení odstraňuje deconex® PROZYME ACTIVE bezpečně a účinně rozmanité organické nečistoty, např. bílkoviny, tuky, sacharidy a ve vodě nerozpustnou vlákninu, díky tomu také např. krev, zbytky tkání, hlen, stolici a další.

Neobsahuje kyseliny EDTA ani NTA ani potenciálně alergenní přísady, jako jsou vonné látky.

Hlavní charakteristiky přípravku deconex® PROZYME ACTIVE:

- vynikající účinnost čištění při pokojové teplotě
- hloubkové odstraňování biofilmu
- vysoká snášenlivost s jinými materiály
- nízké dávkování
- málo pěnivý
- dobře se oplachuje
- bez kyselin EDTA a NTA
- bez parfemace
- biologicky odbouratelný

Použití a dávkování

Ruční nanášení

Pro optimální čištění při ručním nanášení se doporučuje teplota 20–45 °C.

Použití	Dávkování	Teplota	Čas
Ruční (namáčecí lázeň)	2–10 mL/L	20–45 °C	2–10 min
Ultrazvuková lázeň	1–5 mL/L	až do 45 °C	5 min

deconex® PROZYME ACTIVE

Bezpečnostní upozornění

Informace o průmyslové bezpečnosti a řádné likvidaci najdete v bezpečnostním listu deconex® PROZYME ACTIVE.

Skladování

Skladujte výrobek při teplotách mezi 5 a 25 °C.

Výrobce:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



List s údaji o výrobku

deconex® PROZYME ACTIVE

Vysoce účinný neutrální koncentrovaný čisticí prostředek (detergent) s větším počtem enzymů

Je vhodný pro vysoce náročné ruční čištění chirurgických nástrojů, minimálně invazivních nástrojů, dentálních nástrojů, anestetických prostředků a prostředků pro nemocniční oddělení, a zejména pro pevné a pružné endoskopy.

Složení

Směsi detergentů
Enzymy (proteáza, amyláza, lipáza, celulóza)
Rozpouštědla
Konzervační látky

Snášlivost s materiály

deconex® PROZYME ACTIVE má širokou snášlivost s materiály.

Vhodný pro:

nerezavějící ocel, hliník, eloxovaný hliník, titan, měď, mosaz a všechny běžně používané plasty, elastomery včetně polyuretanu, silikon, teflon, gumu a latex. Žádná známá nekompatibilita materiálu.

Uživatel musí provést náležité testy snášlivosti pro zde neuvedené materiály nebo kontaktovat společnost Borer Chemie AG.



Koncentrát:

Vyžádejte si samostatný informační list pro snášlivost s transportními a peristaltickými hadicemi.

Znalecké posudky

Označení CE

deconex® PROZYME ACTIVE splňuje požadavky na zdravotnické prostředky v souladu se směrnicí 93/42/EHS.

deconex® PROZYME ACTIVE

Fyzikálně chemické údaje

Hodnota pH	1 % roztok v demineralizované (DI) vodě	cca 8.95
Hustota	koncentrát	1.03 g/mL
Vzhled	koncentrát	modrý

Balení

Nádoba, plomby a štítky jsou vyrobené z recyklovatelného polyethylenu.

Velikosti nádob

Typ kontejneru	Objem	Číslo položky
Láhev	1 L	524705.00-F10W
Kanystr	5 L	524705.00-K05W
Hluboký kanystr	5 L	524705.00-KK5W
Kanystr	10 L	524705.00-K10W
Kanystr	25 L	524705.00-K25W
Barel 200 L	200 L	524705.00-B220

Další informace

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití a příslušný bezpečnostní list.

Využijte naše know-how ke svému prospěchu! Obratě se na nás pro další informace týkající se vašeho konkrétního použití.

Výrobce:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

