



Guia de arranque rápido Viseira ViVe

1 – Montagem das fivelas e do elástico

Passo o elástico nas duas fivelas na sequência mostrada nas fotos seguintes:

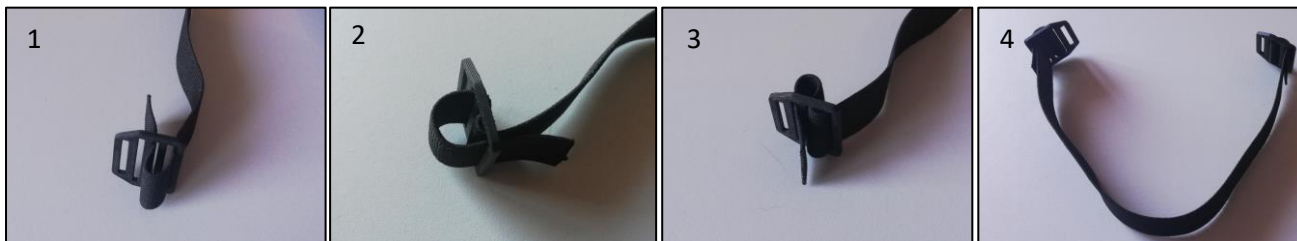

Monte as fivelas na estrutura da viseira:

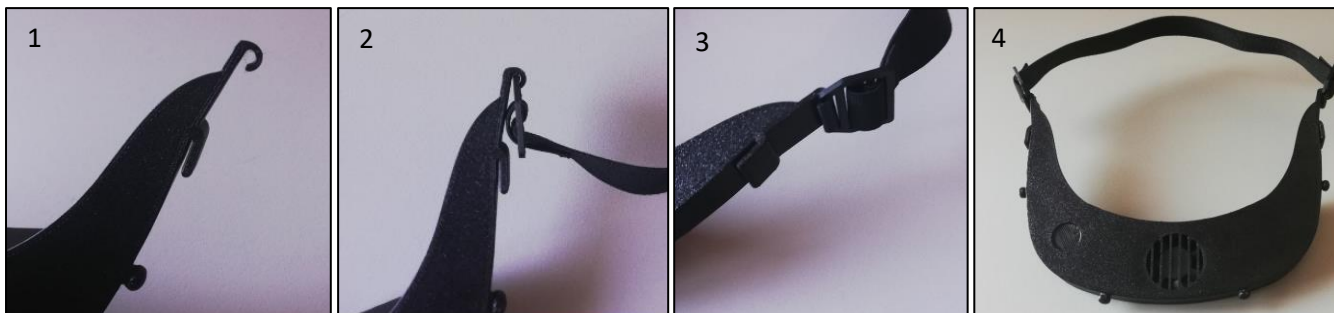

Ajuste a tensão do elástico ao seu gosto

2 – Montagem da viseira na estrutura

Retire a película de plástico protetor. Sugere-se começar por um dos cantos.

Antes de começar a encaixar a viseira na estrutura, assegure que o orifício para o conector de carga da viseira fica alinhado com o conector USB-C da estrutura.



Comece por encaixar a viseira numa das abas e encaixe a viseira nos pinos até encaixar a viseira na aba oposta

3 - Montagem do desembaciador de óculos

O módulo de desembaciamento de óculos é fixo à tampa inferior da viseira através de 2 parafusos, apertado nos furos assinalados nas figuras seguintes. Os furos têm uma capa protectora que será quebrada durante o aperto dos parafusos.

O aperto dos parafusos deve ser ligeiro para evitar danos nas peças.




Fotografias mostrando a sequência de montagem da esquerda para a direita

4 - Montagem do módulo de filtragem

O módulo de filtragem é montado na parte superior da estrutura apertando 4 parafusos nos furos assinalados nas imagens seguintes. Os furos têm uma capa protectora que será quebrada durante o aperto dos parafusos.

A processo inicia-se montando a tira de elemento filtrante na estrutura. Após o elemento filtrante estar montado, monta-se o módulo na estrutura apertando os 4 parafusos.

O aperto dos parafusos deve ser ligeiro para evitar danos nas peças.

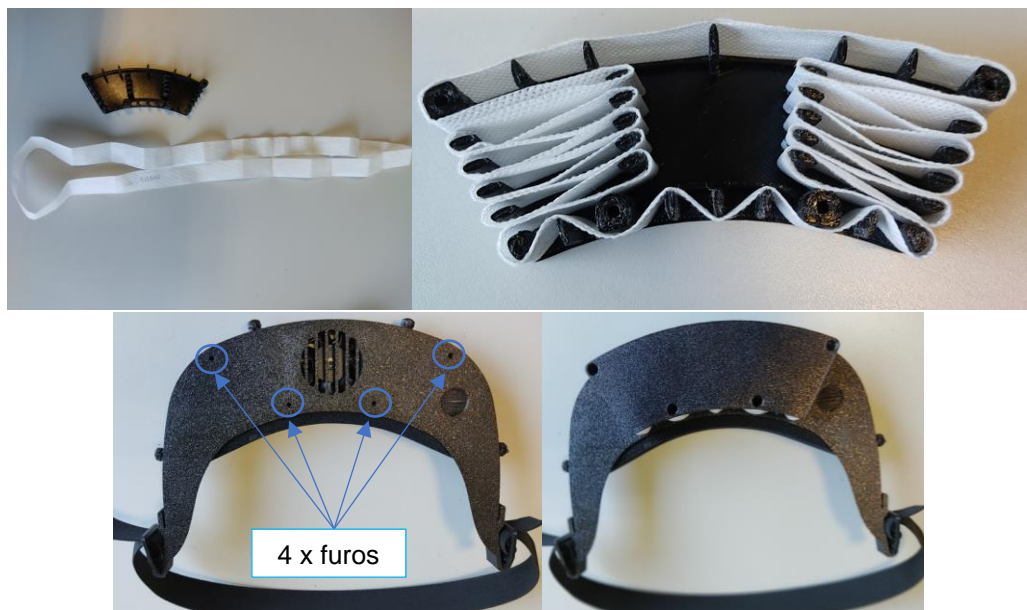

Fotografias mostrando a sequência de montagem da esquerda para a direita

5 – Carregue a bateria

Para carregar a bateria ligue a viseira a um carregador de telemóvel ou a um power-bank providos de cabo com conector tipo USB-C.



A bateria fica completamente carregada em até 3 horas.

6 – Ligar e desligar ventilador

Para ligar ou desligar o ventilador basta passar com um dedo na zona com textura assinalada na fotografia.



7 – Seleccionar velocidade do ventilador

A viseira tem 3 velocidades de ventilação. Para seleccionar a velocidade pretendida pressione levemente e com toques de menos de 1 segundo na zona texturada. O besouro dará 1 toque sonoro quando seleccionar a 1ª velocidade, 2 toques quando seleccionar a 2ª velocidade, e sucessivamente. Se continuar a mudar velocidade voltará a seleccionar a 1ª velocidade.

8 - Manutenção e limpeza



ATENÇÃO: Não mergulhe o produto em água ou qualquer tipo de líquidos, exceptuando a viseira transparente, as fivelas e o elástico.



ATENÇÃO: Não utilize dispositivos tipo autoclave ou exposição a temperaturas acima de 60°C para a desinfecção do produto ou seus componentes.

Limpe o produto pulverizando as superfícies com desinfetante e utilizando um pano para limpar o excesso.

9 – Autonomia e carregamento

Após uma carga completa, a bateria instalada na viseira permite uma autonomia de até 5 horas.

É possível estender a autonomia utilizando um power-bank com cabo de conector USB-C.

O tempo de carregamento depende do carregador utilizado.

10 – Informação transmitida pela Viseira

- Com a viseira em uso:
 - Mudança de velocidade do ventilador
 - besouro emite 1 sinal sonoro quando é seleccionada a 1ª velocidade
 - besouro emite 2 sinais sonoros quando é seleccionada a 2ª velocidade
 - besouro emite 3 sinais sonoros quando é seleccionada a 3ª velocidade
 - Bateria necessita de recarga – besouro emite um impulso sonoro led fica a piscar
- Com a viseira em carga:
 - Bateria carregada – LED fica aceso em contínuo
 - Bateria em carga – LED acende de forma intermitente

Nota: quando se inicia a carga, o led pode demorar cerca de 10 segundos a ligar