

PROTESIL PUTTY

Protesil Putty è un silicone da condensazione di alta viscosità, progettato per la presa della prima impronta nella tecnica della doppia impronta dentale.

Alta scorrevolezza iniziale che permette una semplice e sicura miscelazione manuale. Il prodotto, particolarmente morbido durante l'inserimento nella bocca, ha un ottimo equilibrio tra elasticità e rigidità.

APPLICAZIONI

Protesil Putty è adatto a tutti tipi d'impronta: realizzazione di protesi fissa, protesi mobile, apparecchi ortodontici, provvisori, ecc.



Il prodotto è adatto al uso con tutti i tipi di porta impronte. Nel caso di casi clinici edentuli e parzialmente edentuli, è consigliabile l'utilizzo dei Superform Tray System ®. Nel caso di porta impronte non forate, usare Prestige Universal Adhesive.

Solo per uso odontoiatrico

DATI TECNICI

ISO 4832 / ADA 19	Type oPutty Consistency
Miscelazione *	30''
Tempo totale di lavorazione *	1'30''
Permanenza nel cavo orale *	3'
Distorsione alla compressione	3% - 5%
Recupero elastico	>99.5%
Stabilità dimensionale 24 ore (%)	<-0.20%
Durezza – Shore A	50
Colore	Giallo
Aroma	Pesca

* Tempi considerati dall'inizio della miscelazione a 23° C/73° F. Temperature più elevate li accelerano, temperature più basse li rallentano.

DOSAGGIO

Per ogni misurino raso di pasta base, calcolare 2 strisce di Protesil catalizzatore gel della stessa lunghezza del misurino (4 cm).

Alte temperature ambientali o incremento nelle proporzioni del catalizzatore utilizzato possono accelerare il processo di vulcanizzazione, mentre basse temperature o diminuzione della quantità di catalizzatore possono diminuirlo.

MISCELAZIONE

Impastare con cura il materiale di base e il catalizzatore ripiegandolo su se stesso fino a quando il colore diventerà omogeneo e comunque durante un tempo non inferiore a 30 secondi. Il tempo di indurimento può variare secondo la temperatura o l'utilizzo di maggior o minor quantità di catalizzatore.

Adesivo: portaimpronte individuali in foto-polimero di resina sable: pulire la superficie in questione con un batuffolo imbevuto di alcool etilico e fatelo evaporare. Applicare l'adesivo in modo uniforme con l'apposito pennello. Immediatamente chiudere la bottiglia dopo l'uso. Seguire le istruzioni fornite dal produttore dell'adesivo.

Importante: Prima di prendere la seconda impronta, è importante lavare e asciugare accuratamente la prima impronta: Questo per garantire una perfetta adesione tra la prima e seconda impronta.

DISINFEZIONE

Una volta presa la impronta, è importante sterilizzarla per eliminare detriti e saliva. Le impronte possono essere disinfettate mediante immersione in una soluzione di glutaraldeide al 2%, in una soluzione all'ipoclorito di sodio allo 0.5% o in specifici prodotti in commercio da 30 minuti a 1 ora senza subire alterazioni.

COLATURA

È consigliabile la colatura dai 30 minuti alle 72 ore successive alla polimerizzazione ed entro un massimo di due settimane purché l'impronta venga mantenuta a temperatura ambiente. Protesil Putty è compatibile con tutti i gessi dentali di qualità.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato chiuso in luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore, scintille o fiamme. Protesil Putty è valido per un periodo di 36 mesi dalla data di produzione se conservato correttamente. La data di scadenza riportata nella confezione si riferisce alla confezione chiusa dalla produzione.

Il numero di lotto e la data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In caso di segnalazioni al fornitore, è importante citare queste due informazioni onde individuare in maniera corretta e veloce l'intero lotto segnalato.

IMPORTANTE: non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Evitare il contatto del catalizzatore con la pelle o con gli occhi.

In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente con acqua ed interpellare un medico.

IMBALLO

Prodotto Codice/ Descrizione	056004 - Barattolo da 1,5 kg / 900 ml base
Prodotto Codice/ Descrizione	056002 - Bidone 25 kg base
Prodotto Codice/ Descrizione	056021 - Catalizzatore gel 60 ml

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com